

**Aurum** Xtra  
s manukovým medem



Představujeme  
splachovatelný  
sáček  
**Aurum® Xtra**



Zlepšovatelé v **péči o stomie**

# Aurum<sup>®</sup>Xtra

s manukovým medem



## Kombinace dvou revolučních novinek v jednom unikátním splachovatelném sáčku.

Sáček je vyvinutý speciálně pro zvýšení kvality života kolostomiků. Splachovatelný sáček Aurum<sup>®</sup>Xtra je nepostradatelným řešením pro život každého kolostomika, který řeší problém s likvidací použitého sáčku.

Vnitřní vložka sáčku Aurum<sup>®</sup>Xtra může být spláchnuta v jakémkoliv toaletním systému, do kterého je možné splachovat toaletní papír. Nositeli dává pocit běžných toaletních zkušeností a osvobození, které předtím nemohl mít.

Pro stomiky, kteří mají namáhanou nebo citlivou kůži, je nově vyvinut sáček Aurum<sup>®</sup>Xtra. Sáček obsahuje manukový med, který je přidán do šetrného nazatěžujícího hydrokoloidu, což výrazně podporuje a zlepšuje hojení kůže v okolí stomie.



### Výhody Aurum<sup>®</sup>Xtra...

#### Šetrný k pokožce

Do hydrokoloidní podložky Hyperflex<sup>®</sup> je přidán manukový med, který podporuje hojení kůže v okolí stomie.

#### Svoboda

Nikdy nebudete muset řešit likvidaci použitého sáčku.  
Splachovatelný v domácí toaletě.  
Úspora času a pohodlné řešení výměny sáčku.

#### Manukový med

Manukový med pomáhá ničit bakterie, potlačit zánět a stimulovat růst buněk.

#### Splachovací vložka

Vnitřní vložka i podložka mohou být jednoduše spláchnuty.  
Biologicky se rozloží v každém odpadním systému.





## Vlastnosti a výhody

- Hyperflexní® hydrokoloid s manukovým medem je šetrný k pokožce a může pomoci snížit podráždění pokožky.
- Snímatelná podložka - uživatelé se mohou rozhodnout, zda oddělit vnitřní vložku i podložku. Tento výběr nabízí větší svobodu při vyhazování sáčků.
- Nový Dual-Carb®2 filtr - laserem řezaný filtr pro optimální přesnost s cílem zabránit nafukování sáčku, ucpávání a lepší pohlčení zápachu.
- Easy2peel™ úchytka - napomáhá k bezproblémovému odstranění podložky a tím snižuje poranění kůže.
- Super měkký voděodolný potah sáčku - výjimečný komfort během nošení.
- Manuál pro vystřížení podložky - podložka s naznačenými otvory umožňuje dokonalé vystřížení přesného otvoru na míru vaší stomie a tím snižuje možnost úniku stolice a tím i následné podráždění pokožky.

“ Cítím výrazné zlepšení. Je to rychlejší a čistější. S Aurum® Xtra se více cítím být člověkem.”

**P.M., Velká Británie**

**Aurum** Xtra  
s manukovým medem

# Jak používat Aurum<sup>®</sup> Xtra

Likvidace sáčku Aurum<sup>®</sup> Xtra je velmi jednoduchá a rychlá. Postupujte podle následujících kroků.

**Krok 1**



Vyhodte vnější obal sáčku do odpadkového koše.

**Krok 2**



Vnitřní vložku sáčku společně s podložkou spláchněte do toalety.

**NEBO**

**Krok 1**



Vyhodte vnější obal sáčku do odpadkového koše.

**Krok 2**



Spláchněte vnitřní vložku sáčku do toalety.

**Krok 3**



**NEBO**

Vyhodte podložku do odpadkového koše nebo spláchněte do toalety.



## Odpovědi na vaše dotazy...

“ Snadné spláchnutí... Cítím se více  
sebevědomě, když jsem venku.”

P.B. - Hereford, Velká Británie

### Jaké jsou výhody manukového medu přidaného do podložky?

Welland Medical Hyperflex® hydrokoloid je vyvinut na základě přírodních ingrediencí. Historická data podporují užití těchto ingrediencí pro aplikaci adheze stomických sáčků na pokožku pacienta. Manukový med je známý především pro své léčivé účinky a může pomoci podpořit zdravou kůži v okolí stomie.

Manukový med je čistý přírodní med vyrobený z nektaru rostliny Manuka, která roste v Novém Zélandu. Po celou dobu je manukový med známý pro své léčivé účinky. Je to jeden z nejstarších známých léků, který byl používán od nepaměti až do dneška. Dlouholetý výzkum ukazuje, že manukový med napomáhá regulovat záněty, regeneruje buňky a má antibakteriální účinky, což může pomoci k lepšímu hojení kůže.\*

### Jak mám vědět, že se sáček rozpustí?

**Aurum® Xtra je vyroben ze 3 biologicky rozložitelných částí:**

1. Bílá vnitřní část je vyrobena ze směsi jednoduchých polymerů a celulózy, které se rozpustí ve vodě.
2. Vnitřek bílé vnitřní vložky je potažen transparentním filmem, který chrání vnitřní vložku sáčku. Ten je také vyroben z jednoduchých polymerů.
3. Podložka je vyrobena z hydrokoloidu, který se skládá ze směsi přírodních materiálů. Když se ponoří do vody, podložka nasákne vodu, nabobtná a poté se rozptýlí do vody.

Biologický rozklad se uskutečňuje hlavně působením bakterií, které se nachází v kanalizačním systému. Jsou to bakterie, které umí rozložit tyto tři části sáčku Aurum® Xtra. Proces trvá stejnou dobu jako při rozkládání běžné stolice.

\*Mnoho odborných studií v angličtině o účincích manukového medu lze nalézt ve veřejně dostupných zdrojích na internetu.

### Jak mám vědět, že se sáček spláchne?

Welland Medical je průkopníkem a neustálým inovátorem splachovatelných sáčků již od roku 1996, kdy byl vytvořen první splachovatelný stomický sáček na světě. Welland Medical Aurum® Xtra a Flair Active® Xtra jsou i nadále jedinými splachovatelnými sáčky na světě. Aurum® Xtra je rozsáhle testován z hlediska splachovatelnosti a jeho následné ekologické odbouratelnosti ve Velké Británii a splňuje mezinárodní standardy stanovené Radou pro výzkum vody. (VB)



# Jak je Aurum® Xtra biologicky rozložitelný?

Vnitřní vložka sáčku a podložka jsou splachovatelné v jakémkoliv systému, kde je možné splachovat toaletní papír včetně septiků, extrakčních systémů např. v letadlech, i v mobilních toaletách.

Biologická rozložitelnost v kanalizaci trvá stejně dlouho jako rozklad stolice.

“Sáček je skvělý!  
Cítím se sebejistě.”


C.D., Nizozemsko

“Tyto splachovací sáčky jsou super... umožňují mi normální život.”

S.F., Velká Británie

1

Jednoduše odloupneme a spláchneme...

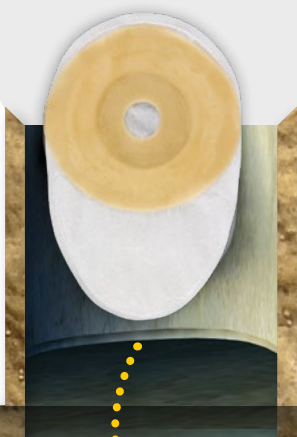


2

Vnitřní vložka vstoupí do kanalizace.

3

Bakterie ve vodě začnou rozkládat vnitřní vložku sáčku a podložku.

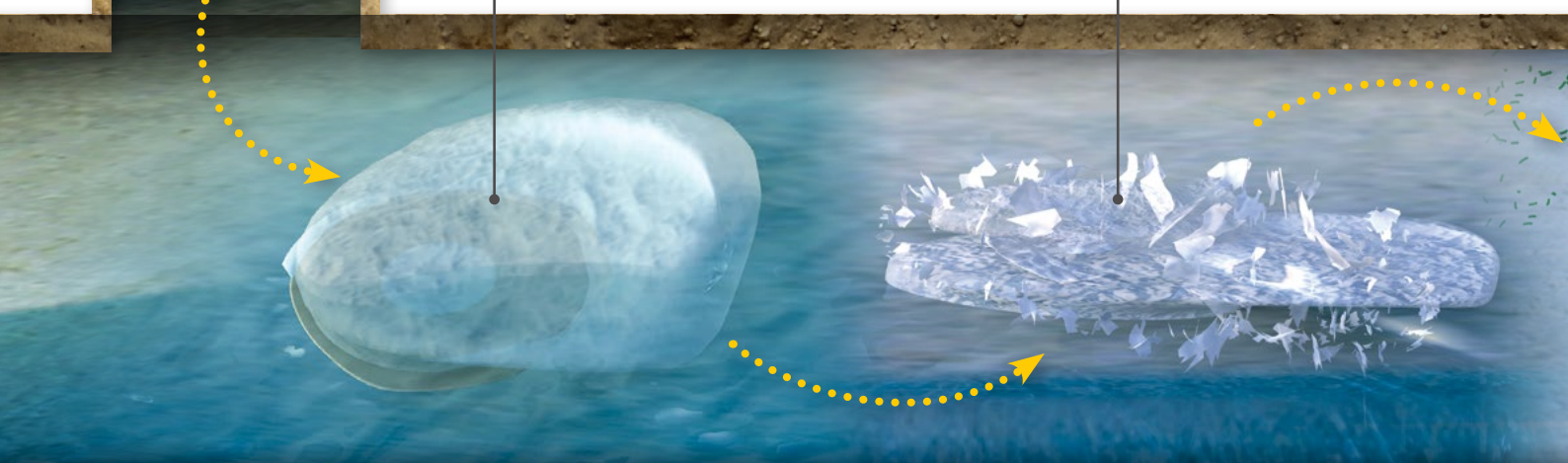

Je šetrný k životnímu prostředí

Biologicky rozložitelná vnitřní vložka sáčku a podložka dělají sáček Aurum® Xtra ekologickým kolostomickým sáčkem.



“Našla jsem velmi snadné použití, které je zároveň mnohem lepší pro moji kůži.”

M.C., Velká Británie




4

Stolice uvnitř sáčku pronikne ven a bakterie ji rozloží.


5

Nakonec je splachovatelný sáček bakteriemi kompletně rozložen.

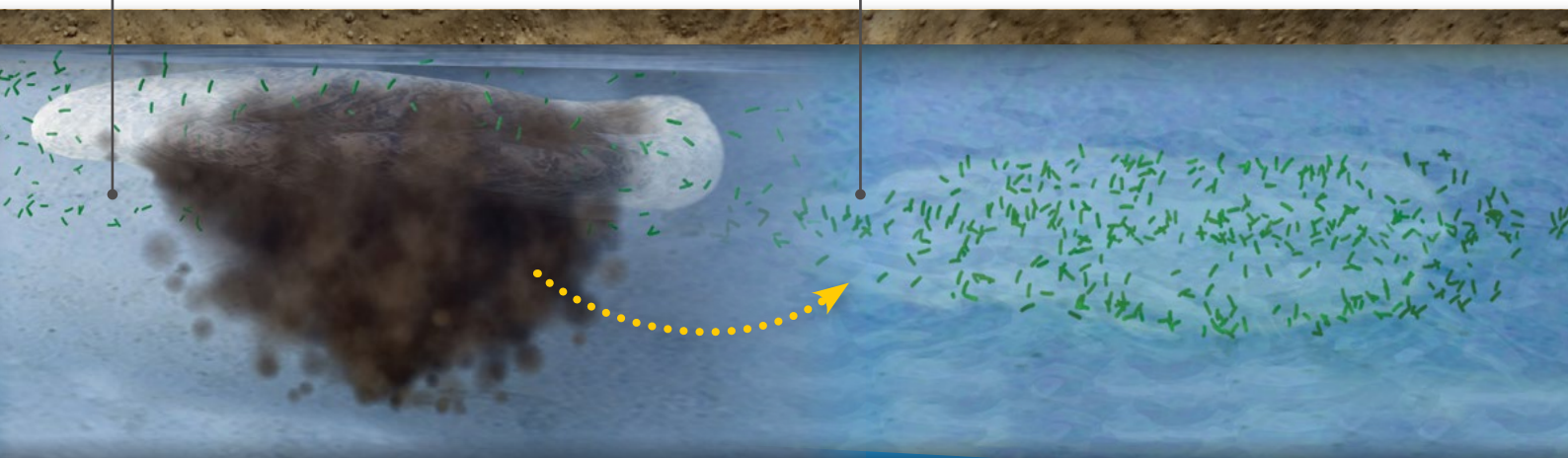

# Aurum<sup>Xtra</sup> s manukovým medem



Název výrobku	velikost	kód SÚK	ks/bal.
 <b>AURUM® Xtra SPLACHOVATELNÝ KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem béžový, XMHFL519</b>	19-50 mm	<b>5002484</b> <b>Plně hrazeno ZP</b>	30

#### Upozornění

Všechny vyobrazené produkty jsou registrovaným zdravotnickým prostředkem určeným pacientům se stomií. Jednodílné kolostomické sáčky Aurum® Xtra slouží k zachycování stolice. O vhodnosti použití se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo stomickou sestrou. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.



Výrobce - **Welland Medical**

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:

**J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.**

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

tel: 371 722 983, **volejte zdarma: 800 100 644**

e-mail: [info@ja-zdravotnickepotreby.cz](mailto:info@ja-zdravotnickepotreby.cz)

Navštivte stránky **[www.ja-zdravotnickepotreby.cz](http://www.ja-zdravotnickepotreby.cz)**

Všechny produkty označené® jsou ochranné známky registrované a patří společnosti CliniMed (Holdings) Limited.

